


## Löschen und Einlernen eines Senders zu Rufempfänger RCL07-01

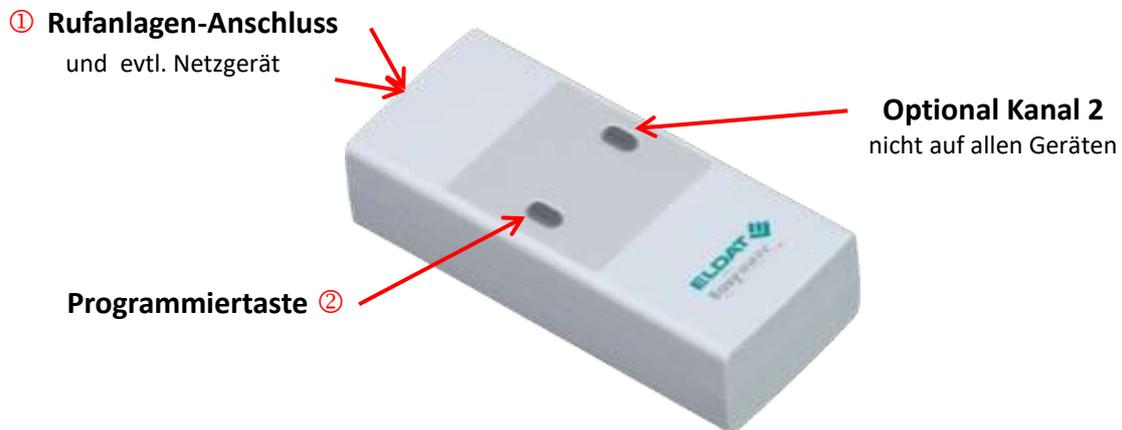

### Löschen des Rufempfangs mehrerer Sender

1. ca. 1,6 Sek. auf die **Programmiertaste**② drücken, die LED blinkt nun schnell
2. Drücken Sie die **Programmiertaste**② erneut länger als 1,6 Sek.
3. Wenn alle Sendecodes gelöscht wurden, leuchtet die LED einmal auf und blinkt dann wieder schnell
4. Drücken Sie die **Programmiertaste**② erneut, um in den Betriebsmodus zurückzukehren

### Programmieren des Rufempfangs eines oder mehrerer Sender

1. **WICHTIG:** Stellen Sie vor Beginn sicher, dass **alle Sender** in der Umgebung (Sensormatten, Daza, Bettfluchtbügel, Armband-/Halsband-Sender usw.) **außer Betrieb bzw. Reichweite** sind, um eine Übertragung der Programmierung zu vermeiden.
2. Stecken Sie den Rufempfänger RCL07 mit dem **Rufanlagen-Anschluss**① an der Rufanlage an und verbinden Sie – falls vorhanden – das Netzgerät mit der Steckdose.
3. **Achtung:** Sollte das **Lämpchen der Programmiertaste**② blinken, erkennt der Rufempfänger einen Sender im Umfeld, welcher vor Durchführung des Einlernens noch außer Betrieb genommen werden muss.
4. Drücken Sie nun ca. 1,6 Sek. auf die **Programmiertaste**②. Das Lämpchen blinkt nun schnell.
5. Bringen Sie jetzt den Sender (Sensormatte, Bewegungsmelder, Bettfluchtbügel usw.) in Betriebsbereitschaft unter Beachtung der Wartezeiten nach dem Einschalten gemäß Bedienungsanleitung (beim Daza ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten) und **lösen Sie dann einen Ruf aus**.
6. Das **Lämpchen der Programmiertaste**② sollte nun kurzzeitig dauerleuchten.
7. Drücken Sie zum Abschluss nochmals die **Programmiertaste**②, um in den Betriebsmodus zu wechseln.

Die Schritte 4.-7. können bis zu 32 Mal wiederholt werden, um andere Geräte mit Easywave-Sender zum gleichen Rufempfänger einzulernen: z.B. einen Arbandsender UND einen Bettfluchtbügel.

Ab sofort kann vom Sender (= Sensormatte, Bewegungsmelder, Bettfluchtbügel, Arbandsender, Halsbandsender, Notrufkissen, Drucktaster, usw.) ein Ruf erfolgen.