


Löschen und Einlernen eines Senders zu Rufempfänger RCL07-11

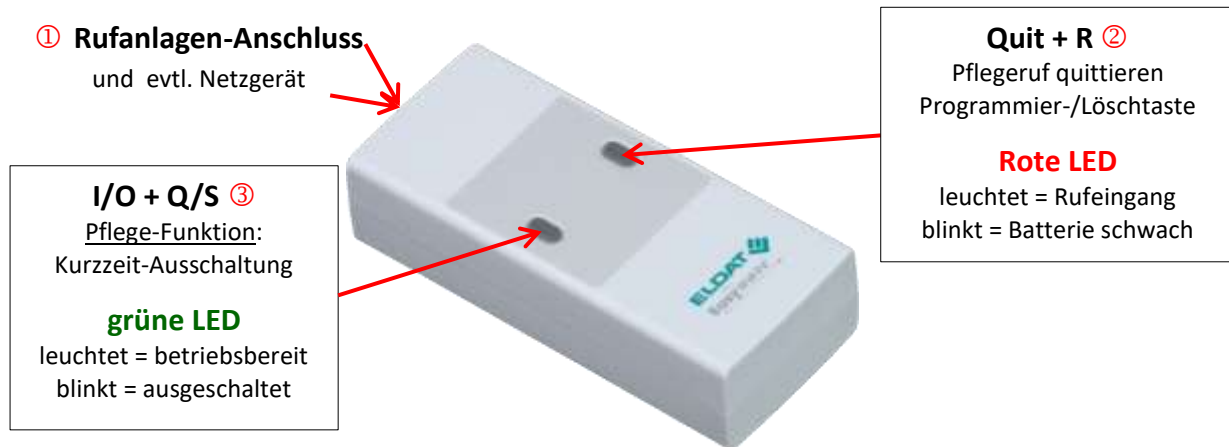

Löschen des Rufempfangs mehrerer Sender

1. ca. 1,6 Sek. auf die **Programmiertaste** ② drücken, die LED blinkt nun schnell
2. Drücken Sie die **Programmiertaste** ② noch einmal länger als 1,6 Sek.
3. Wenn alle Sendecodes gelöscht wurden, leuchtet die LED einmal auf und wechselt in den Betriebsmodus

Programmieren des Rufempfangs eines oder mehrerer Sender

1. **WICHTIG:** Stellen Sie vor Beginn sicher, dass **alle Sender** in der Umgebung (Sensormatten, Daza, Bettfluchtbügel, Armband-/Halsband-Sender usw.) **außer Betrieb bzw. Reichweite** sind, um eine Übertragung der Programmierung zu vermeiden.
2. **Löschen** Sie jetzt **alle Sender** wie folgt:
R-Taste drücken, bis die LED rasch blinkt. R-Taste nochmal drücken, bis die LED 4 Sekunden dauerleuchtet. Nach dem Erlöschen der LED sind alle Sender gelöscht.
3. Stecken Sie den Rufempfänger RCL07 mit dem **Rufanlagen-Anschluss** ① an der Rufanlage an und verbinden Sie – falls vorhanden – das Netzgerät mit der Steckdose.
4. **Achtung:** Sollte das **Lämpchen der Programmiertaste** ② blinken, erkennt der Rufempfänger einen Sender im Umfeld, welcher vor Durchführung des Einlernens noch außer Betrieb genommen werden muss.
5. Drücken Sie nun ganz kurz (max. 1 Sek.) auf die **Programmiertaste** ②. Das Lämpchen blinkt nun.
6. Bringen Sie jetzt den Sender (Sensormatte, Bewegungsmelder, Bettfluchtbügel usw.) in Betriebsbereitschaft unter Beachtung der Wartezeiten nach dem Einschalten gemäß Bedienungsanleitung (beim Daza ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten) und **lösen Sie dann einen Ruf aus**.
7. Das **Lämpchen der Programmiertaste** ② sollte nun kurzzeitig dauerleuchten.
8. Die Programmierung ist abgeschlossen, wenn das Lämpchen nicht mehr leuchtet.

Ab sofort kann vom Sender (= Sensormatte, Bewegungsmelder, Bettfluchtbügel, Armband-/Halsband-Sender, Notrufkissen, Großruftaster usw.) ein Ruf an den RCL07-11 erfolgen.