


## Bedienung des Rufempfänger RCL07-B02

RCL07-B02 sind Rufempfänger mit Anschluss an die Schwestern-Rufanlage.

Sie können mit allen mit Easywave Sendern ausgestatteten Geräten arbeiten:  
 Sensormatten, Bewegungsmelder, Bettfluchtbügel, Armband-/Halsband-Sender,  
 Notrufkissen, Großruftaster, Daza Bewegungsmelder, usw.

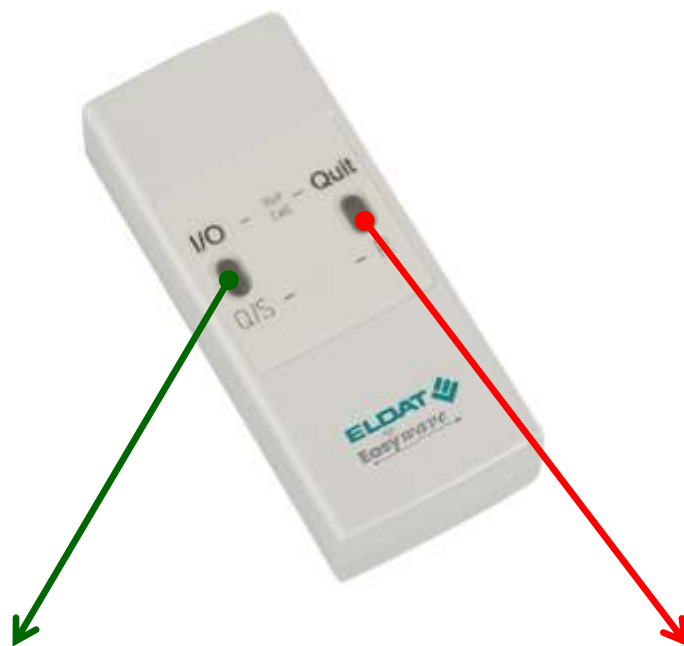

**LED leuchtet grün = betriebsbereit**

### Pflegefunktion:

Die Schalttaste ca. 10 Sekunden lang drücken –  
 das Gerät ist nun deaktiviert/ausgeschaltet,

**die grüne LED blinkt**

Nach 15 Minuten schaltet sich das Gerät  
 automatisch wieder auf Rufempfang!

Um den Rufempfang vorher zu aktivieren, die  
 Schalttaste wieder 10 Sekunden drücken

### Pflegefunktion:

Bei Auslösung eines Rufes **leuchtet die LED rot**  
 (Dauerleuchten) bis diese Taste am Gerät quittiert  
 wird.

**LED blinkt rot = Sender-Batterie schwach**

Die Batterie in Sensormatte, Bettfluchtbügel,  
 Arbandsender, Notrufkissen, usw. muss in Kürze  
 getauscht werden

**ACHTUNG:** Alarme an die Schwestern-Rufanlage müssen immer direkt am Rufempfänger quittiert werden!