


Sollten im Telegate Guard 01 Lesegerät **keine zuverlässigen Alarmierungen** erfolgen, empfehlen wir das Zurücksetzen der Alarme am Lesegerät Guard 01, für welches Sie wie folgt vorgehen:

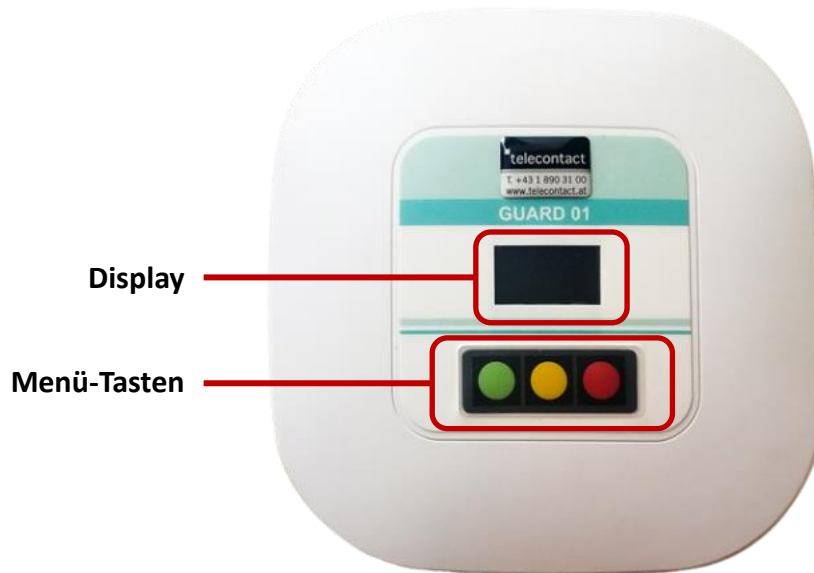

Beschreibung der Tasten-Funktionen

Gelbe Taste → Menü aktivieren und Menüauswahl bestätigen

Grüne Taste → Menü-Auswahl oder Wert vermindern

Gelbe Taste → Menü-Auswahl oder Wert erhöhen

Das Zurücksetzen von Alarmen

1. Das Lesegerät Guard 01 vom Netz nehmen, eine Minute lang warten und dann
2. die **Gelbe Taste** gedrückt halten und während dessen
3. das Guard 01 Lesegerät wieder am Netz anstecken;
4. Nun warten, bis am Display „Management Patienten Setup“ erscheint
5. **Grüne Taste** zweimal drücken → Display-Anzeige: Setup
6. **Gelbe Taste** drücken zur Bestätigung
7. **Grüne Taste** nochmals zweimal drücken → Display-Anzeige: „Delete Alarm R“
8. **Gelbe Taste** drücken zur Bestätigung
9. Display-Anzeige „Wait!“ → 60 Sekunden warten, bis Anzeige erlischt, dann
10. **Grüne Taste** drücken zum Verlassen des Menüs und mit der
11. **Gelben Taste** bestätigen